




**Das professionelle Studiokonzept
zur gezielten Umfangsreduktion**

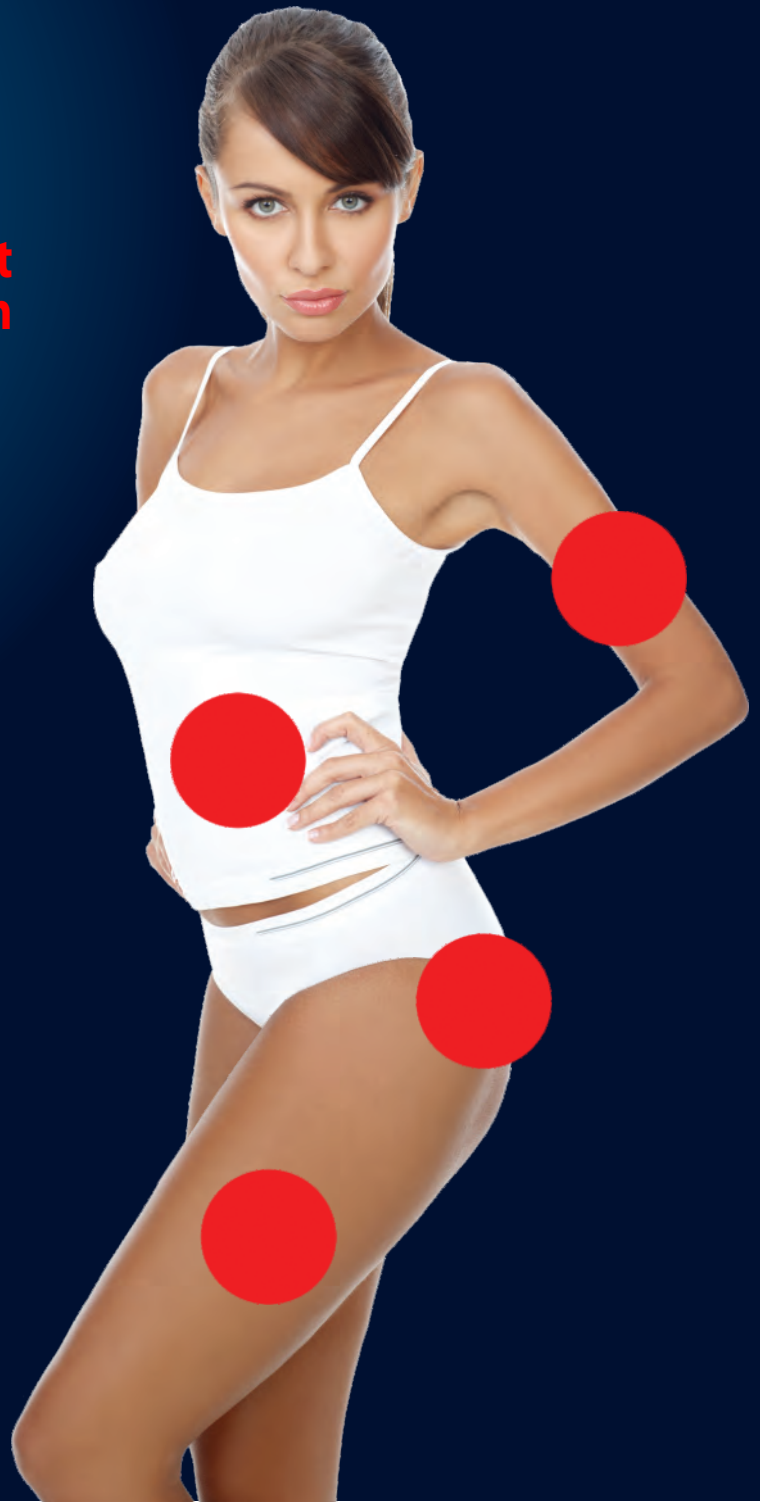

4 Problemzonen eine Lösung




Figurformung, abnehmen, schlanker werden sind zentrale Themen, wenn es um die Entscheidung geht ein Fitness-Studio zu besuchen. Eine Studie der Universität Gießen hat gezeigt, dass **95% aller Frauen**, die mit einem Fitnesstraining starten, nur die Erhaltung oder Verbesserung ihrer Figur dabei zum Ziel haben.

In der Zukunft werden Konzepte, die die Verbesserung der Figur in den Mittelpunkt stellen, das Entscheidungskriterium für den Gewinn von Neukunden sein.

Mit TRISLIM haben wir eine Entwicklung getan, die mit einfachen Mitteln, auf unspektakulärer Weise den Wünschen einer breiten Bevölkerungsschicht

GEZIELTES ABNEHMEN AN DEN PROBLEMZONEN

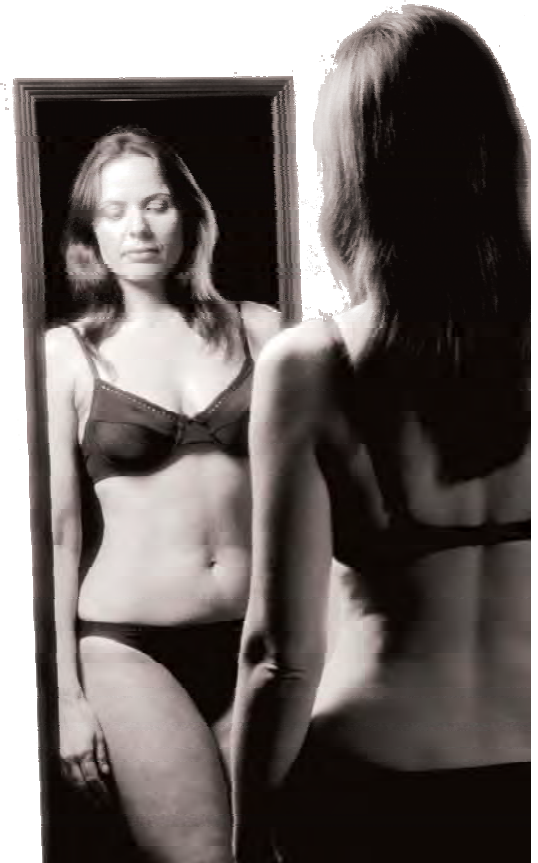

6 entscheidende Punkte für Ihren Erfolg:

- Sie werden den Bedürfnissen und Wünschen Ihrer Kunden gerecht
- Sie bieten ein attraktives Zusatzangebot an
- Sie heben sich vom Wettbewerb ab
- Sie erhalten ein Marketinginstrument, das Menschen anspricht die dem Fitnesstraining eher skeptisch gegenüber stehen
- Sie steigern Ihren Umsatz deutlich und senken die Fluktuation
- Sie erhalten zufriedene Kunden, die Sie gerne weiterempfehlen

Sie machen die Erfolge Ihrer Kunden zum Erfolg Ihres Unternehmens



TRISLIM ist eine Neuentwicklung mit dem Ziel das äußere Erscheinungsbild der Hauptproblemzonen Bauch - Beine - Arme-Gesäß zu verbessern.

Ziel war es ein System zu entwickeln, das :

- maximale Erfolge erreicht
- sich in jedes Studio integrieren lässt
- minimalen Personalaufwand erfordert
- geringe Kosten verursacht
- einfach in der Anwendung ist

Das Problem

Man geht heute davon aus, dass es sich bei der Entstehung Problemzonen um eine Störung im Stoffwechsel handelt, hervorgerufen durch Veränderungen der Lebensbedingungen, Krankheiten, Bewegungsmangel.

Bei allen so genannten Problemzonen sind drei Faktoren maßgeblich vorhanden:

1. eine schlechte Durchblutung gekoppelt mit einer Störung des Stoffwechsels
2. eine verstärkte Ansammlung von Flüssigkeit im Bindegewebe
3. Fettzellen mit vermehrter Fetteinlagerung

Eine wirkungsvolle Therapie muss also:

- die Durchblutung verbessern
- Flüssigkeit im Binde/ Fettgewebe abbauen.
- den Stoffwechsel anregen
- den Fettabbau beschleunigen

Die Lösung - TRISLIM -

Ein System das mit Druckluft gesteuerten Manschetten arbeitet.

Das TRISLIM - Einkammersystem ist richtungsgebunden,

d.h. die Druckluft und damit die Massage erfolgt in definierten

Richtungen, die neben einer optimalen Durchblutung auch

eine bestmögliche Aktivierung des Lymphsystems gewährleistet.

Die zusätzlichen Aktivpunkte erhöhen den intensiven

Massageeffekt deutlich, ohne unangenehm oder störend zu wirken.

Die Arbeitsweise ist denkbar einfach:

In der Druckphase, hier am Beispiel der Beinmanschette,



wird venöses Blut und Lymphflüssigkeit zur Körpermitte

transportiert. Der Abbau von Fett wird in dieser Region verstärkt,

da die Durchblutung gesteigert ist und der Fettabbau .

Während der Phase des normalen Drucks, wird

verstärkt arterielles Blut in die Kapillare transportiert.

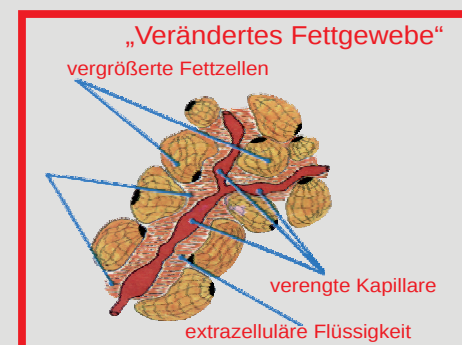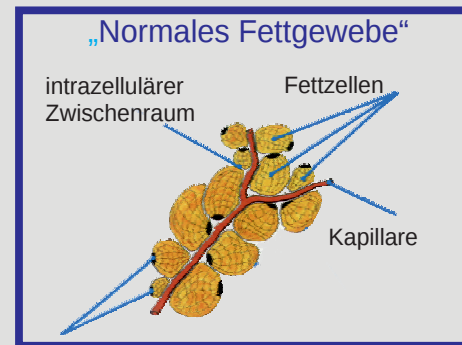

4 Problemzonen, eine LÖSUNG

TRISLIM wirkt optimal in Verbindung mit dem normalen Kardiotraining. Die gesteigerte allgemeine Durchblutung, der „Muskel-Pumpen-Effekt“ und die Massagewirkung von TRISLIM ergänzen sich optimal bei der lokalen Umfangsreduzierung.

Kurze Anwendungszeit

Eine Trainingseinheit beträgt 30 Minuten

Die Intensivphase sollte 6 Wochen mit jeweils 3 Anwendungen sein.

Welche Ergebnisse kann man erwarten ?

Diese Frage wird fast immer gestellt werden. Abgesehen vom Wettbewerbsrecht das solche Aussagen für Werbezwecke unterbindet (eine Abmahnwelle hat das bereits ausgelöst), ist es sehr schwierig eine exakte Prognosen gegenüber seinem Kunden machen zu können.

Wir haben in sehr vielen dokumentierten Anwendungen, z.B. am Bauch, eine Umfangsreduzierung von bis zu 10cm messen können. Auch an Beinen und Gesäß können ähnliche Ergebnisse beobachtet werden.

Manschetten

TRISLIM Manschetten werden aus zwei unterschiedlichen Materialien gefertigt. Das äußere, blaue Material besteht aus einer reiß- und scheuerfesten Gewebe/PU-Folie. Die innere Folie besteht aus reinem PU, einem Material das sehr dehnbar ist und sich damit sehr gut an den Körper anpasst. Die unterschiedlichen Druckstufen werden durch dieses weiche Material optimal auf den Körper übertragen. PU ist sehr hautfreundlich, leicht zu desinfizieren und wird häufig in der Medizintechnik eingesetzt. Wir haben diese Materialkombination gewählt, um eine hohe Lebensdauer zusammen mit einer guten Körperanpassung zu gewährleisten. Die Manschetten werden in Deutschland, in einem nach DIN 9001 und ISO EN 13485 zertifizierten Betrieb, gefertigt.



Bedieneinheit Trislim PRO - Chip

Die Bedieneinheit ist das Herzstück von TRISLIM.

Die Hochleistungspumpe zur Erzeugung des Luftdruckes und die gesamte Elektronik sind darin integriert. Der schnelle und sehr exakte Druckwechsel erfolgt durch die eigens dafür entwickelte Steuer- und Regelelektronik. Digitale Drucksensoren überwachen den gesamten Ablauf. Die Bedieneinheit wird aus Edelstahl und Acrylglas gefertigt. Mit einem Gewicht von ca. 8 Kg. lässt sie sich leicht von einem Standort zum Nächsten transportieren.

Der Anschlußschlauch hat eine Länge von 3,00 mtr. und wird bei nach Benutzung in einem Halter untergebracht.

Die Stromversorgung erfolgt durch ein separates Steckernetzteil.

Steuerung Trislim PRO - Chip

Um eine benutzerfreundliche und präzise Steuerung des gesamten Systems zu gewährleisten, setzen wir einen Mikroprozessor ein, der fortlaufend den Druckaufbau und das Zeitintervall, in dem der Druck aufgebaut wird, überwacht. Ein gleichbleibendes Training wird damit gewährleistet. Das übersichtliche Display stellt alle relevanten Funktionen dar:

- zu Beginn der Soll-Druck und die Länge des Intervalls
- im Betrieb den Ist-Druck und die verbleibende Zeit des Intervalls.

Zusätzlich wird die verbleibende Trainingszeit dargestellt.

Je nach Bindegewebetyp, lässt sich der maximale Druck und die Wirkungszeit in fünf Stufen einstellen.


Alle wesentlichen Komponenten werden in Deutschland gefertigt und kommen überwiegend aus Industrie und Medizintechnik.

Nutzungskontrolle Trislim PRO - Chip

Die Nutzung der TRISLIM Systeme ist nur mittels Chipkarte möglich. Dieses System haben wir entwickelt und setzen es seit 6 Jahren in unseren Swingvibe Vibrationsplatten ein. Das System hat sich bestens bewährt, da es eine Kontrolle der erfolgten Trainingseinheiten einfach ermöglicht. Jeder Kunde erhält eine persönliche Chipkarte auf der ein Kontingent an Trainingseinheiten gespeichert wird. Die Programmierung erfolgt direkt am Bedienterminal und kann nur durch das Personal mit einer „Masterkarte“ erfolgen.

Trislim Pro - Club

Alle wesentlichen Komponenten und Eigenschaften sind identisch mit der Version Chip. Bei unserem Model Club haben wir auf die Chipkarteneinheit verzichtet. Dadurch konnten wir auch das Display auf die dafür wesentlichen Anzeigen reduzieren. Der Druck ist in 5 Stufen einstellbar, die Zeitanzeige läuft im „Count-Up-Modus“. Die Anwendungszeit ist auf 30 min. begrenzt. Das Anwendungsintervall beträgt 20 sek. Trislim Club eignet sich bestens für Studios, die keine Benutzerkontrolle benötigen. Die Ausgabe der Manschette ist als Kontrollfunktion ausreichend.

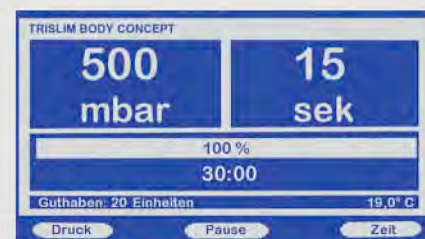

Trislim, als neues Modul in Ihrem Unternehmen, kann unterschiedliche Funktionen innerhalb Ihrer Struktur übernehmen:

- als **Marketinginstrument** für Ihre Neukundenwerbung, mit einer Thematik die viele Menschen anspricht.
- als **Profitcenter**, Ihr Kundenstamm erhält eine besondere, zuzahlungsfähige Leistung
- als **neues Modul** innerhalb Ihres Zahlungssystems

Mit Trislim erhalten Sie ein Instrument, das dem Wunsch, nach einem schnellen Abnehmen an den unangenehmen Problemzonen, vieler Kunden gerecht wird.

Trislim ist das ideale Modul zur effektiven Neukundengewinnung

Es gibt nur wenige Leistungen, die heute noch zusätzlich von Ihren Kunden bezahlt werden. Dazu zählen Leistungen die gezielt ein massives Problem verbessern oder gar beseitigen. Mit Trislim positionieren Sie sich als **Figurspezialist** am Markt. Trislim ist ein Zusatzangebot, das Sie als zuzahlbare Leistung hervorragend vermarkten werden.



Bereits zwei neue Mitglieder, die Sie durch eine Trislim - Werbeaktion gewinnen können, amortisieren die Anschaffungskosten eines Trislim-Systems (bei monatlich 50.- € Beitrag).

Wir empfehlen eine Testaktion für potentielle Neukunden, die 6 Wochen an einer „Studie“ teilnehmen zu einem Aktionspreis von 99.- Euro.

Trislim ist das ideale Modul zur Steigerung Ihres Umsatzes

Beispiele von Preisberechnungen für unterschiedliche Beitragsmodelle:

1. Neukundengewinnung durch 6 Wochen - Testaktion	99.- €
2. Intensivkurs für bestehende Mitglieder 6 Wochen	49.- €
3. Langzeitabonnement, Aufpreis auf den Mitgliedsbeitrag monatlich	9,90 €
4. Zu buchbares Modul bei Wochenabrechnung	1,90 €
5. Personenkreis der nur Trislim nutzen möchte monatlich	39.- €

Die oben angeführten Preisbeispiele haben sich in der Praxis bereits bestens bewährt.

Trislim kann für die 4 Hauptproblemzonen genutzt werden, so dass Sie auf eine breite , potentielle Kundschaft zurück greifen können.

Es hat sich gezeigt, dass bei einer Werbeaktion von ca. 50 Trislim Testkunden 10 -15 der Teilnehmer neues Mitglied werden.

Kaum ein anderes System wird so viel Interesse wecken und sich bereits nach kurzer Zeit refinanzieren.

Trislim, das ideale Modul zur Steigerung der Attraktivität Ihres Unternehmens



TRISLIM ist das exzellente Marketing- Werkzeug mit dem Sie effektive, externe Werbung machen können. Das Thema gezieltes Abnehmen und Verbesserung der Figur ist für viele Menschen ein zentrales Bedürfnis geworden. Die lokale Bewerbung mit TRISLIM spricht alle Personen an, die aktiv gegen ihre Problemzonen etwas unternehmen möchten.

Dabei sprechen wir vor Allem den Personenkreis an, die noch nicht in einem Fitness-Studio trainiert haben, also genau die Personen die als Neukunde nur schwer anzusprechen sind.

Wir unterstützen Sie auf dem Weg Ihr Unternehmen zum Figurspezialisten zu avancieren. Wir zeigen Ihnen erprobte Marketing-Strategien rund um TRISLIM auf, die in kurzer Zeit deutliche Erfolge aufweisen, denn ein Konzept ist nur so gut wie es umgesetzt werden kann.

Wir unterstützen Sie mit Werbemitteln die den Punkt treffen:


- Roll-Ups und Banner
- Plakate in verschiedenen Dimensionen
- Flyer
- Erfolgsurkunden
- Vorlagen für Zeitungswerbung
- Reminder, Terminkarten
- Mailingvorlagen
- Gutscheine
- Bild und Textmaterialien für Ihre Homepage
- PR-Texte



Terminkarte



Flyer 2-seitig 150 x 265 mm

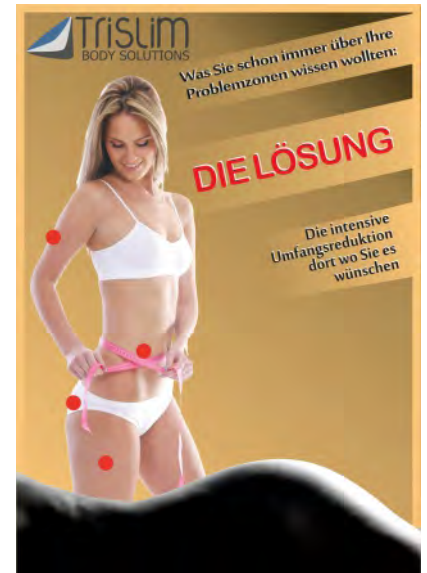

Flyer 2-seitig A%



Anzeigenwerbung



Erfolgsurkunde A4



Einmal-Gutschein

Banner bis 4,00x2,40 m und Plakate A1/A0

Technische Daten

Model	Trislim Pro Chip, Trislim Club	
Ausführung	pneumatisches Wechseldruck-System	
Überdruck	1 regelbar 150-200-300-450-600 mbar	
Zeitintervall	Pro Chip 3-stufig 15-20-25 Sekunden, Club 20 Sekunden	
Bedieneinheit Pro	Volledelstahl, Acrylglasverkleidung Mikroprozessorsteuerung LCD -Display 240 x 128 Px ,monochrome 3-Tastenbedienung, für Druck-Start/Stop-Zeitintervall I2C Bus - Chipkarteneinheit integriert,	
Bedieneinheit Club	2 zeilig 128 x 64 px monochrome 2- Tastenbedienung, Druck- Start/Stop	
Stromversorgung	separates Netzteil, 100 - 240 Volt/50 Hz, 120 VA	
Chipkartensteuerung	Benutzerkonto mit Guthabenfunktion in Trainingseinheiten Trainingseinheit frei wählbar in Sekunden Guthaben 1-9999 Trainingseinheiten	
Mastercard	Zugangskontrolle zum Verwaltungsmenü + Festprogrammspeicher	
Abmessungen	Pro Club	Bedieneinheit: 1.000 x 250 x 250 mm(H x B x L) Bedieneinheit: 900 x 250 mm
Gewicht	Bedieneinheit Pro / Club 12 Kg	
Manschetten	Material:außen PU beschichtetes reißfestes Nylongewebe innen - PU Schnellverschluss mit Steckschließer, Gurtband PE 30 mm	
Bauchmanschette	Gr. 1 für Umfänge 55 - 95 cm,Gr. 2 für Umfänge 85 - 145 cm	
Beinmanschette	für Umfänge 55 - 85 cm,Lieferung paarweise, Klettverschluß	
Armmanschette	Universalgröße 20 - 40 cm, Lieferung paarweise,Klettverschluß	
Gesäßmanschette	Universalgröße 90 - 140 cm	
Anschlussschlauch	2,50 m, Silikon, Anschluss über Schnellkupplung	
Prüfzeichen	CE	

TRISLIM Trainingstechnologie „Made in Germany“



Trislim
BODY SOLUTIONS

Trislim Body Solutions
UG (haftungsbeschränkt)
Borsigstr. 7a
D-65205 Wiesbaden
Tel.:0049 (0) 6122 7078524
email: info@trislim.de